

# FLYTANDE SÅRPLAST



CE  
0120



80ml

- ett sårplast förband baserad på akryl copolymer för enkel och snabb behandling av skrapår och mindre skador.
- efter applikation, torkar den inom 3 minuter.
- den bildar en vattensäker skyddande hinna.
- förbandet är inte vattenlösligt.
- den hindrar mikro-organismer från omgivande miljö.
- den hindrar inte naturlig hud svettning.
- såret förblir stängt mot ogynnsamma påverkningar, dock fortgår läkeprocessen under plastfilmen.
- sårförbandet försvinner av sig själv efter 3-4 dagar genom gradvis förtunning av plasthinnan genom nötning.

## Produktfakta

**Sårplast** spray är en aerosol med snabbtorkande sårplast. Den är tillverkad av akryl copolymer plast.

**Sårplast** spray ger en snabbt och säkert skydd. Den är gjord för att skydda mindre sår och skador såsom *rivsår, skrubbsår och skärsår*,

## Egenskaper och fördelar

**Sårplast spray** minskar risken för infektion, skyddar mot vatten och smuts. Enkel- bekväm och säker att använda, bra på områden där det är svårt att använda vanliga plåster och förband.

## Användningsområden

Den behändiga sprayförpackningen ger en enkel, snabb, effektiv och säker hjälp för behandling av mindre sår. Speciellt lämplig för ytliga skador i nedre extremiteterna tassar; Produkten är lämplig för behandling av mindre nötning och snitt hos djur. **Sårplast spray** är speciellt lämplig för behandling av skador hos djur som vistas i vått eller dammig miljö, där andra typer av förband misslyckas. *Den skall inte användas att täcka sår med stor blödning.*

## Användning

Spraya från ett avstånd på ca 15 - 20 cm. Spraya ett tunt lager, låt torka. Under appliceringen skydda ögat från kontakt med sprayan.

Innehåll: Ethyl acetat, Copolymer acrylate Drivgas: Dimetyleter

